

# HYGIENEPLAN

oneway Suisse GmbH  
Dorfplatz 11  
CH - 8737 Gommiswald

Tel. 055 293 23 90  
info@oneway-suisse.com  
www.oneway-suisse.ch



	PRODUKT	FÜR	ANWENDUNG	ZUBEREITUNG DER LÖSUNG	HINWEISE
	PLIWA® Derm Händedesinfektion	Hygienische Händedesinfektion	Die Hände mit der Lösung einreiben und 30 Sekunden lang feucht halten.	Gebrauchsfertige Lösung	Die Zeitangaben sind Mindestzeiten. Je nach zusätzlichen Erschwernissen sind die Einwirkzeiten zu verlängern. Wirkt nicht sporenabtötend und ist daher für die Aufbewahrung steriler Instrumente und Spritzen ungeeignet.
	PLIWA® Biguaton forte Neu Instrumentendesinfektion	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ärztliches Instrumentarium</li> <li>• Laborgeräte aus Glas, Porzellan, Metall, Gummi, Kunststoff usw.</li> <li>• thermolabiles Anästhesiezubehör</li> <li>• starre und flexible Endoskope</li> </ul>	Konzentrat mit 30 - 40 ° C warmen Wasser verdünnen. Instrumente nach Gebrauch vorreinigen und in Lösung einlegen. Instrumente gründlich abspülen und trocknen.	Konzentrat Wasserzugabe nötig  Einwirkzeit 5 - 60 Min	Geeignet für alle Zirkulationsverfahren und Ultraschallgeräte. Um eine optimale Wirkung zu erzielen, empfiehlt es sich die Lösung täglich zu erneuern. Wichtig: Die Instrumentenwanne muss vor der ersten Anwendung gründlich gereinigt werden. Sie darf keine Rückstände von anderen Instrumentenlösungen enthalten.
	PLIWA® RotoPren Bohrerdesinfektion	<ul style="list-style-type: none"> <li>• zahnärztliche Bohrer</li> <li>• rotierende Präzisionsinstrumente</li> </ul>	Bohrer sofort nach Gebrauch (ohne Vorreinigung) in Lösung einlegen. Danach Instrumente mit klarem Wasser abspülen und -trocknen.	Gebrauchsfertige Lösung  Einwirkzeit 1 - 5 Min	Keine Aluminiumteile einlegen. Nicht mit anderen Reinigungsmitteln mischen.  Die benutzte Lösung täglich erneuern um die optimale Wirksamkeit zu erzielen.
	PLIWA® Lemon Fresh AF Sprühdesinfektion Citrus	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Flächen</li> <li>• Möbel</li> <li>• Bekleidung</li> </ul>	Auf Gegenstände und Flächen unverdünnt aufsprühen und einwirken lassen. Ggf. die überschüssige Restmenge mit trockenem Einmaltuch entfernen.	Zur Desinfektion von 1 m <sup>2</sup> benötigt man 15 bis 20 ml gebrauchsfertige Lösung  Einwirkzeit 30 Sek - 5 Min	Nicht anzuwenden auf alkoholempfindlichen Flächen wie Acrylglas und Leder!
	PLIWA® Lemon Fresh AF Hygienetücher	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Flächen</li> <li>• Möbel</li> <li>• Bekleidung</li> </ul>	Gegenstände, Oberflächen und Teile gut abwischen und trocknen lassen. Erst nach der Einwirkzeit wieder benutzen.	Gebrauchsfertige Lösung  Einwirkzeit 30 Sek - 5 Min	Nicht anzuwenden auf alkoholempfindlichen Flächen wie Acrylglas und Leder!
	PLIWA® Mikroclean Plus D Sauganlagendesinfektion	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Absauganlagen</li> </ul>	Mindestens 1- bis 2-mal täglich nach Arbeitschluss pro Absaugstelle mit 1 Liter der frisch hergestellten Lösung durch die zu reinigenden Schläuche etc. saugen.	Konzentrat Wasserzugabe nötig  Einwirkzeit 1 - 60 Min	Nicht über Nacht oder länger als 48 Stunden einwirken lassen. Die Gebrauchslösung für jeden Desinfektionsvorgang frisch ansetzen.  Nicht mit Zusätzen oder anderen Präparaten mischen!
	oneway® Einwegfilter	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Absauganlagen</li> <li>• Separierautomatik</li> <li>• Selektivablagen</li> </ul>	Einwegfilter in die Anlage setzen.		Einwegfilter sollten zweimal wöchentlich gewechselt werden.